



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. **ИМЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:** NEARLY ME[®] Breast Form Products and accessories (силиконови форми за гърди – гърдни протези /епитези/)
2. **ПРОИЗВОДИТЕЛ:** Capital Marketing Technologies, Inc, 3630 South I-35, Suite A, Waco, Texas, USA 76706
3. **ВИД НА МАТЕРИАЛА:** Silicone Rubber Base - силикон
4. **СТЕРИЛИЗАЦИЯ:** няма
5. **ПАРТИДЕН НОМЕР:** (има на опаковката)
6. **СРОК НА ГОДНОСТ:** няма определен срок на годност
7. **УПОТРЕБА:** за многократна употреба
8. **НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:** Съгласно указанието за употреба
9. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** няма

10. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Намокнете или измийте ръчно протезата само с мека топла сапунена вода. Други почистващи препарати не се препоръчват. Промийте щателно с хладка вода, за да отстраните всякакви сапунени или козметични остатъци, които могат да дразнят кожата. Подсушете с мек плат.

Ако гърдната протезата се носи при плуване, след употреба я почистете по гореописания начин. Не се препоръчва носенето на гърдната протезата в гореща вана или SPA центрове.

Внимание: Да се избягва продупчването на гърдните протезите покрити с тънък полиуретанов слой. Тези протези могат да бъдат повредени при убождането с остри предмети, като например бижута или игли. Да се избягва честото пристягане на гърдните протезите, защото това може да доведе до загубата на тяхната функция или въобще до пълното им непригодност и разрушаване.

NEARLY ME[®] Traditional Pear and Heart Shape Forms

Измийте ръчно гърдната протеза както е описано по-горе. Подсушете протезата с кърпа. Ако е необходимо я напудрете с пудра за тяло.

Понякога по време на транспортиране и съхранение може да се появи слаб мирис, оцветяване, мазен гланц. За да ги премахнете измийте протезата като следвате препоръките описани по-горе. Да се избягва поставянето на гърдните протези директно върху рисувани, лакирани или пластмасови повърхности, защото има опасност по тях да се образуват петна от естествените масла, които се съдържат фабрично в протезите.

Други предохранителни мерки валидни за всички гърдни протези:

Ежедневно ръчно измиване или в перална машина (топла и щадяща програма), след което подсушаване.

Когато протезата /епитезата/ за гърди NEARLY ME[®] не се употребява, моля съхранявайте я в оригиналната ѝ опаковка.

